

Hausnotrufgerät Lifeline Vi



Ausstattung und Funktionen

- Das Lifeline Vi wird mit Strom versorgt und darf deshalb nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Wenn das Gerät trotzdem einmal nass wird, den Netzstecker und den Telefonstecker herausziehen und die Servicezentrale benachrichtigen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Das Gehäuse darf nur von Fachleuten geöffnet werden.
- Wenn sie den Eindruck haben, das mit dem Gerät etwas nicht stimmt, z.B. weil die LED-Lampe blinkt, wenden sie sich an die Servicezentrale.
- Setzen sie das Gerät weder Hitze noch Kälte noch Chemikalien, viel Staub oder heftigen Erschütterungen aus.
- Lassen sie das Lifeline Vi immer am Stromnetz.
- Das Gerät wird regelmäßig mit Statusanrufen auf Funktion getestet
- Auch ohne Telefonanschluss, ist eine Aufschaltung möglich. Und zwar mit einer Mobilfunkkarte
- Notrufe auch auf private Telefone möglich

Allgemeine Beschreibung

Das Lifeline Vi Hausnotruf- und Servicegerät, das im häuslichen Umfeld zusätzliche Sicherheit und Unabhängigkeit speziell für Senioren, Menschen mit Behinderung oder chronisch Kranke bietet.

Mit dem Lifeline Vi können Sie schnell und einfach Hilfe herbeirufen, rund um die Uhr. Durch Drücken der roten Ruftaste am Lifeline Vi Gerät oder an Ihrem Funksender stellen Sie umgehend eine Verbindung zur Servicezentrale, zu Verwandten oder zu Freunden her.

Nachdem der Alarm von der Notrufzentrale bestätigt wurde, haben Sie mit Ihr eine direkte Sprachverbindung. Sie können ohne zusätzliches Telefon Sprechen und Hören.

Weitere Alarmgeber, wie z.B. Türalarm, Rauchmelder, Bewegungsmelder etc. können problemlos angeschlossen werden. Ebenso können mehrere Handsender auf ein Notrufgerät geschaltet werden.

Technische Daten:

Abmaße (B x L x H): 122 x 185 x 45 mm

Gewicht: 440 g

Stromversorgung: 230 V AC; 10 A Steckdose

Notstromakku: 1200 mAh Kapazität (wird intern aufgeladen)

Akkubetrieb: 30 Stunden Stand-by bei neuem, voll aufgeladenem Akku

Funkfrequenz: 869.2125 MHz – im Frequenzband für Alarmnutzung

Externe Anschlüsse: 3 m Telefonkabel mit TAE – Stecker

Regelmäßige Kontrolle der Geräteüberwachung und der Batteriekapazität

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
DNS-2012-3000	Lifeline Vi Hausnotruftelefon	Weitere Alarmgeber siehe zusätzliche Datenblätter